

Lumbamed® maternity

Anziehanleitung

Bitte beachten Sie, dass das erstmalige Anlegen unter Einweisung von geschultem Fachpersonal erfolgen sollte.




Bevor Sie die Orthese anlegen, lockern Sie bitte die Zuggurte, damit das Anziehen ohne Zug erfolgt. Lösen Sie hierzu die Klettenden der Gurte und setzen diese wieder locker weiter hinten auf.



Schlüpfen Sie zuerst in die Hand-schleufe der rechten äußeren Verschlussseite.



Führen Sie die Orthese um den Körper und legen die linke Verschlussseite unter Spannung an den Bauch an.

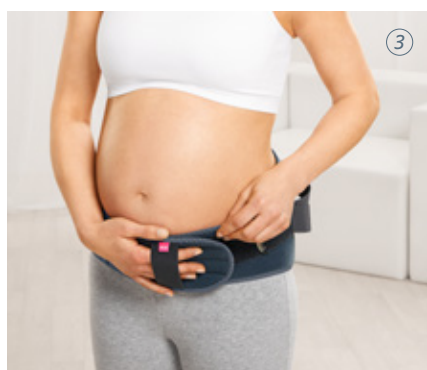

Ziehen Sie die rechte Verschlussseite über die Linke und kletten Sie diese fest.



Lösen Sie nun die Klettenden der Zuggurte und ziehen Sie diese gleichzeitig nach vorne. Die Spannung können Sie je nach Ihren Bedürfnissen und Ihrem Schmerzempfinden selbst regulieren.



Die Orthese sitzt richtig, wenn der Verschluss unterhalb des Bauches schließt und diesen stützt.