


Mediven® Kompressionsstrümpfe

Anziehanleitung

medi


Bitte beachten Sie, dass das erstmalige Anlegen unter Einweisung von geschultem Fachpersonal erfolgen sollte.

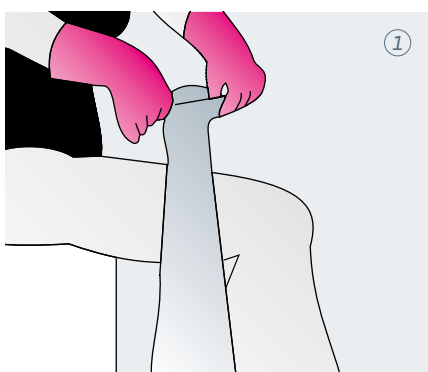


1 Fassen Sie mit einem Gummihandschuh in den Strumpf. Greifen Sie die Ferse und ziehen den Strumpf auf links.




2 Ziehen Sie den Strumpf bis zur Ferse über den Fuß.

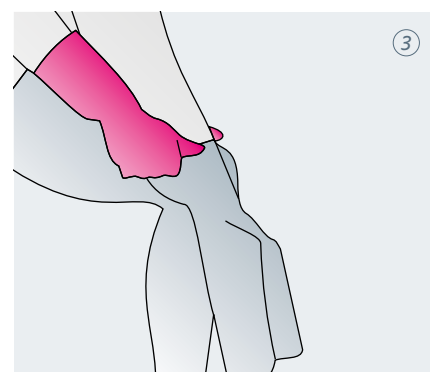


3 Fassen Sie das Gestrick der oberen Lage in der Fußmitte. Heben Sie es dann über die Ferse.

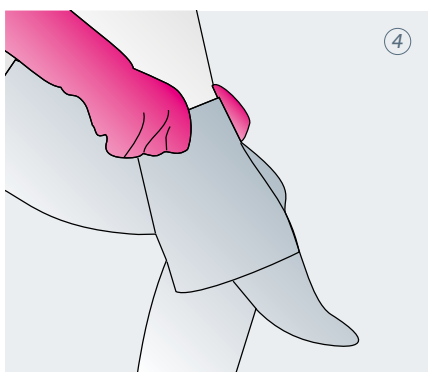

4 Fassen Sie das herunterhängende Material erneut mit beiden Händen. Legen Sie es gleichmäßig an den Unterschenkel an.

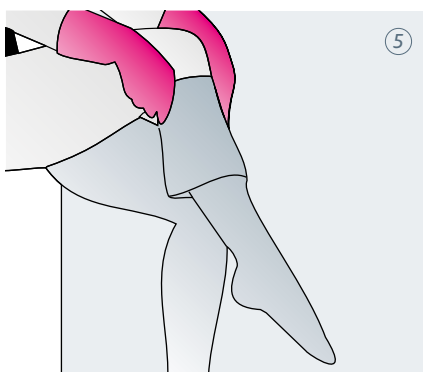

5 Legen Sie den Strumpf etappenweise bis zum Knie an.

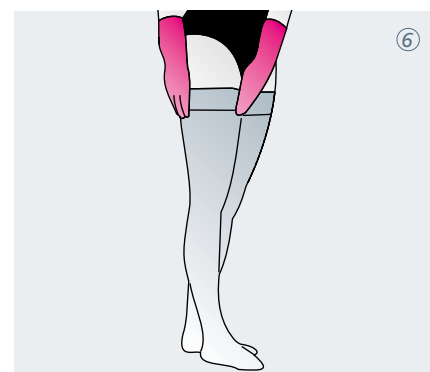

6 Prüfen Sie den kompletten Strumpf oder die Strumpfhose auf den richtigen Sitz.

Zweckbestimmung:
Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.
Flachgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Lymphgefäßsystems.
Anziehhilfe für medizinische / klinische Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen.



Tipp

medi Lang-Griff Butler – die Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe

- Erleichtert das Anziehen von Kompressionsstrümpfen
- Auch für Strumpfhosen geeignet